

LE MASCHERINE A PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

1. Prima di indossare i dispositivi delle vie respiratore, eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani.
2. Indossare i dispositivi per le vie respiratorie, posizionandoli correttamente a protezione della bocca e del naso.
3. Durante l'uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti.
4. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l'elastico.
5. Sanificare con soluzioni alcoliche o acqua e sapone le proprie mani prima e dopo aver toccato o aggiustato la posizione del respiratore (per migliorare il comfort o per mantenerlo in posa ad esempio).
6. È necessario smaltire il DPI dopo l'uso. Scartare le maschere monouso dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche.
7. È necessario smaltire i DPI che mostrino evidenti danni o che non consentano la corretta respirazione dell'operatore.

Il Presidente

Maurizio Degl'Innocenti